

AbenaNyt Sygepleje

Maj 2010

Silflex silikone sårkontaktlag

Silflex er et sårkontaktlag med silikone. Det er fremstillet af polyester og imprægneret med Silfix blød silikone. Silflex klæber forsigtigt til den tørre hud omkring såret, hvilket bevirker en skånsom tilhæftning og minimerer smerter og traume ved skift af bandagen.

Kan anvendes som sårkontaktlag til alle typer sår, hvor der er risiko for at bandagen hænger i, til overfladiske sår af forskellig ætiologi.

Bandagen kan tilklippes, og det anbefales at klippe før den beskyttende film fjernes. Silflex må gerne gå ud over sårkanterne. Tildæk med passende sekundær bandage.



Silflex silikone sårkontaktlag

Varenr.	Varebeskrivelse	Størrelse	Mindstekøb	Pris/stk.
221494	Silflex silikone sårkontaktlag	5x7 cm	10 stk.	14,80
221495	Silflex silikone sårkontaktlag	8x10 cm	10 stk.	26,00
221496	Silflex silikone sårkontaktlag	12x15 cm	10 stk.	47,85
221497	Silflex silikone sårkontaktlag	20x30 cm	10 stk.	86,95



Activon honning

Activon er steril, medicinsk Manuka-honning, der har antiinflammatorisk og antibakteriel virkning. Desuden medvirker Activons osmotiske effekt på oprensning af såret. Mindsker lugtgener og medvirker til fugtig sårheling.

Kan anvendes på alle typer sår i alle faser.

Activon honning


Varenr.	Varebeskrivelse	Størrelse	Mindstekøb	Pris/stk.
221481	Activon tube honning	25 g	1 stk.	44,00
221482	Activon tulle honning	5x5 cm	5 stk.	38,00
221483	Activon tulle honning	10x10 cm	5 stk.	56,00

Adva-Co langstræksbandage med indikatorer

Indikatorerne gør bandageringen mere enkel og medvirker til at anlæggelsen bliver med et subbandagetryk på 40mmHg i ankelniveau gradueret opad.


Bandagen anlægges med simpel spiralteknik med 50% overlap. De to rektangulære trykindikatorer angiver korrekt anlæggelse. For at sikre et optimalt subbandagetryk måles ankelomkredsen før anlæggelse af bandagen:

- den lille markering til brug for ankler på 18 – 26 cm i omkreds.
- den store markering for ankler med over 26 cm i omkreds.

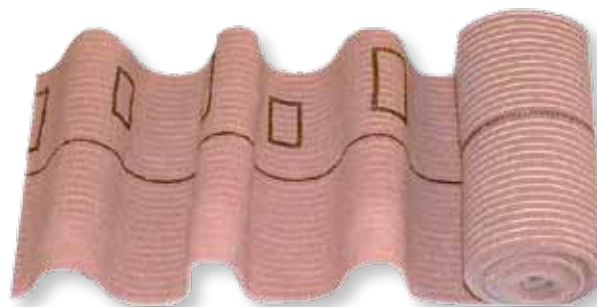

Adva-Co langstræksbandage

Varenr.	Varebeskrivelse	Størrelse	Mindstekøb	Pris/stk.
221498	Adva-Co langstræksbandage m. indik.	10 cm x 3,5 m	1 stk.	41,20

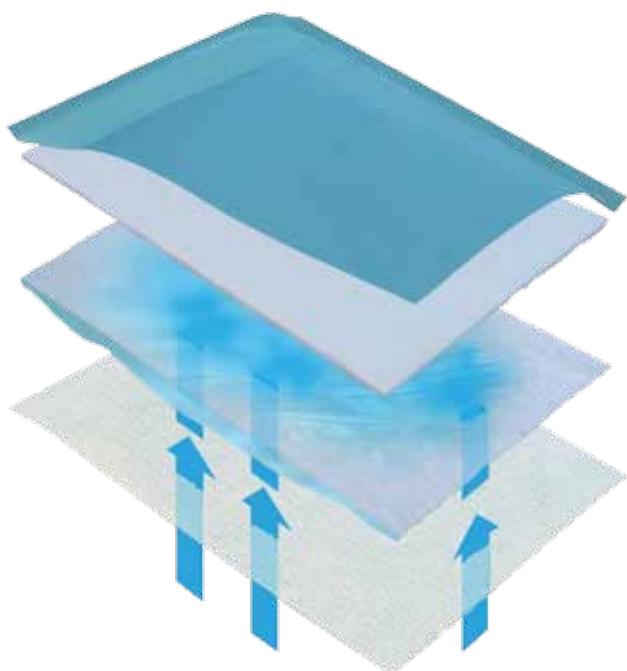

Eclypse Adherent

Eclypse Adherent er en kraftig absorberende sårbandage med et blødt Silfix silikone-sårkontaktlag. Den bløde silikone giver en god og skånsom tilhæftning på den tørre omgivende hud. Silikonelaget bevirker også, at såret kan tilses og bandagen genplaceres.

Det unikke XU-lock system, der omdanner sår-eksudat til en gel-agtig fugtig masse, betyder en meget høj absorptionskapacitet. Dette bevirker, at risikoen for maceration af den omgivende hud mindskes, ligesom væskehåndteringen er høj og derved kan skiftefrekvensen nedsættes. Oversiden er en semipermeabel væskerestistent overflade, der hindrer gennemsivning.

Bandagen er velegnet til alle sårtyper, der er moderat til kraftigt væskende, og er specielt egnet til at håndtere blod.

Eclypse Adherent

Varenr.	Varebeskrivelse	Størrelse	Mindstekøb	Pris/stk.
221500	Eclypse Adherent	10x10 cm	10 stk.	26,80
221501	Eclypse Adherent	10x20 cm	10 stk.	41,60
221502	Eclypse Adherent	15x15 cm	10 stk.	53,50
221503	Eclypse Adherent	20x30 cm	10 stk.	107,60

Episil Absorbent

Episil Absorbent er en selvklæbende absorberende bandage med blød Silfix silikone.

Bandagen består af en væskeabsorberende pude af polyuretanskum på en film af polyuretan med en klæbeflade af silikone.

Bandagen sikrer atraumatisk bandageskift, idet silikonen kun hæfter på den tørre hud.

Silikonetilhæftningen sikrer, at sår væsken ikke løber ud på den omgivende hud, og dermed minimeres maceration af såromgivelserne.

Bandagen er delvist gennemsigtig, hvilket bevirker, at man kan følge sårsekretionen og udefra vurdere hvornår bandagen skal skiftes. Det er muligt at inspicere såret og genplacere bandagen.

Anvendes til let til moderat væskende sår i alle faser.



Episil Absorbent

Varenr.	Varebeskrivelse	Størrelse	Mindstekøb	Pris/stk.
221504	Episil Absorbent	7,5x7,5 cm	10 stk.	18,50
221505	Episil Absorbent	10x10 cm	10 stk.	23,30
221506	Episil Absorbent	15x15 cm	10 stk.	45,75
221507	Episil Absorbent	10x20 cm	10 stk.	37,45
221508	Episil Absorbent	15x20 cm	10 stk.	49,90



AdvaFlex bandagefiksering

Anvendes til fiksering af kompressionsbandager. AdvaFlex er et ikke-klæbende fikseringssystem, der med sine små mikro-kroge sikrer en effektiv fiksering af bandagen.

Idet AdvaFlex ikke hæfter på glatte, tæt vævede eller coatede bandager anbefaler man at afprøve AdvaFlex's hæfteevne inden brug.

AdvaFlex håndteres let, idet de sidder på en spole, og nemt kan tages fra denne og applikeres på bandagen.

AdvaFlex langstræksbandage

Varenr.	Varebeskrivelse	Størrelse	Mindstekøb	Pris/pk.
221499	AdvaFlex bandagefiksering	15x54 mm	200 stk.	228,80

Acticoat Flex 3 og 7

Fleksibelt sårkontaktlag med sølv. Anvendes til sår med risiko for infektion eller til infektiøse sår.

Har en hurtig og langvarig antimikrobiel effekt, som indtræder inden for 30 minutter og holder i op til hhv. 3 og 7 dage. Kan anvendes til alle typer sår.

Lægges fladt på sårbunden eller fyldes løst i det dybere sår. Sårkontaktlaget har en åben struktur, hvilket muliggør let væskegennemstrømning, og derved mindsker risiko for maceration af hudomgivelser. Passende sekundær bandage ovenpå, alt efter skiftefrekvens og eksudatmængde. Kan klippes i.



Acticoat Flex 3 og 7

Varenr.	Varebeskrivelse	Størrelse	Mindstekøb	Pris/stk.
221562	Acticoat Flex 3	5x5 cm	5 stk.	40,50
221563	Acticoat Flex 3	10x10 cm	5 stk.	92,80
221565	Acticoat Flex 3	10x20 cm	12 stk.	144,40
221566	Acticoat Flex 3	20x40 cm	6 stk.	540,25
221567	Acticoat Flex 3	40x40 cm	6 stk.	886,65
221568	Acticoat Flex 3	10x120 cm	6 stk.	921,65
221557	Acticoat Flex 7	5x5 cm	5 stk.	64,80
221558	Acticoat Flex 7	10x12,5 cm	5 stk.	207,35
221559	Acticoat Flex 7	15x15 cm	5 stk.	379,15
221560	Acticoat Flex 7	20x40 cm	6 stk.	863,35
221561	Acticoat Flex 7	40x40 cm	6 stk.	1820,00

Hvis du er interesseret i at købe eller få mere at vide om produkterne, er du meget velkommen til at klikke ind på AbenaOnline på www.abena.dk

Du er også altid velkommen til at kontakte os for yderligere information på salgsygepleje@abena.dk eller tlf. 74 31 05 00.

Med venlig hilsen

Abena Sygepleje

Hvis du har svært ved at modtage nyhedsbreve på din e-mail, kan du altid finde de seneste nyhedsbreve online på www.abena.dk/kundeservice/nyhedsbrev.aspx