


ABENA®


ABENA Wing




STÅENDE SELVHJULPEN - bælteble lukker på maven

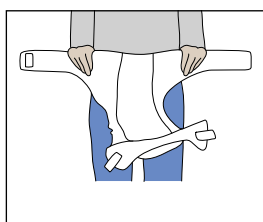

1
Fold bleen ud og fold den på langs med bagsiden vendt udad, så der skabes en skålform. Berør ikke indersiden af bleen.

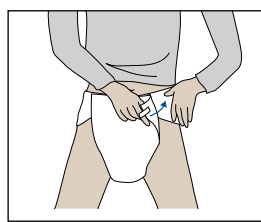


4
Fastgør bleens front til bæltet ved hjælp af kombitapen på begge sider.

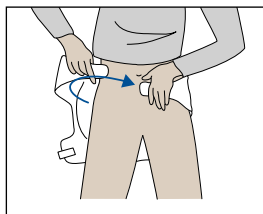

2
Fastgør bæltet rundt om hofterne ved hjælp af velcrobåndene.



5
Sørg for, at kanterne sidder tæt ind mod lyskenområdet med bagsiden vendt udad og væk fra huden.

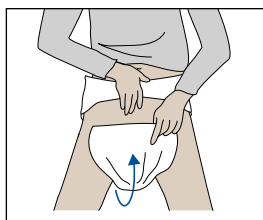

3
Træk bleen op med retning fra bag mod front. Brug vådindikatorens linjer til at tjekke om bleen er placeret midt på kroppen.



Sørg for, at bleen sidder tæt og behageligt. Hvis produktet ikke sidder tæt i lyskenområdet, fikses bæltet længere oppe på hoften.



Påætningsvideoer


BECAUSE WE CARE

abena.dk


ABENA Wing




STÅENDE ASSISTERET - bælteble lukket på ryggen

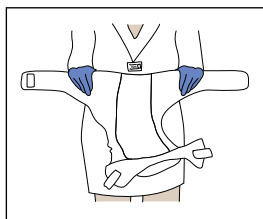

1 Fold bleen ud og fold på langs, med bagsiden vendt udad, så der skabes en skålf orm. Berør ikke indersiden af bleen.

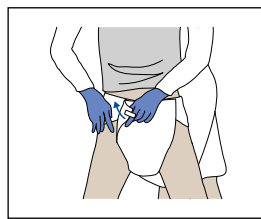


4 Fastgør bleen til bæltet ved hjælp af kombitapen på begge sider.

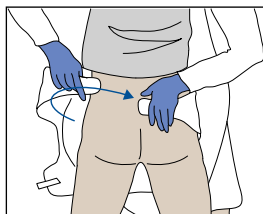

2 Fastgør bæltet rundt om hofterne ved hjælp af velcrobåndene.



5 Sørg for, at kanterne sidder tæt ind mod lyskenområdet med bagsiden vendt udad og væk fra huden.

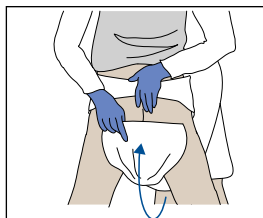

3 Træk bleen op med retning fra front mod bag. Brug vådindikatorens linjer til at tjekke om bleen er placeret midt på kroppen..



Kombitapen med klæb og velcro kan omplaceres flere gange. Følg altid myndighedernes og organisatoriske retningslinjer for korrekt anvendelse og brug af alle kontinensprodukter til at støtte brugeren.




Påsetningsvideoer

ABENA Wing




SIDDEDE ASSISTERET - bælteble

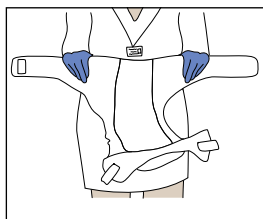


1 Fold bleen ud og fold den på langs, så der skabes en skålform med bagsiden vendt udad. Berør ikke indersiden af bleen.




2 Fastgør bæltet rundt om hofterne ved hjælp af velcrobåndene.

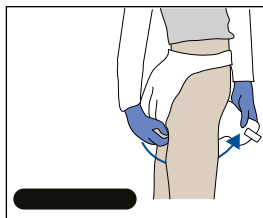

3 Hjælp brugeren til stående stilling, og træk bleen op med retning fra bag mod front.

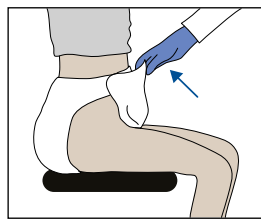

4 Hjælp brugeren tilbage i siddende stilling og fastgør bleens front til bæltet ved hjælp af kombitapen på begge sider. Brug vådindikatorens linjer til at tjekke om bleen er placeret midt på kroppen.

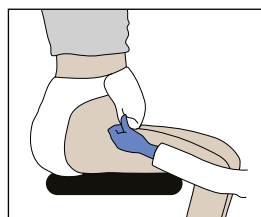

5 Sørg for, at kanterne sidder tæt ind mod lyskenområdet med bagsiden vendt udad og væk fra huden.

! ABENA Wing har generelt længere bæltestropper end andre bæltebleer, hvorfor bælteforlængere ikke er nødvendige. Sørg for, at bleen sidder tæt og behageligt. Hvis produktet ikke sidder tæt i lyskenområdet, fikses bæltet længere oppe på hoften.



På sætningssvideoer


BECAUSE WE CARE

abena.dk


ABENA Wing




LIGGENDE ASSISTERET - bælteble

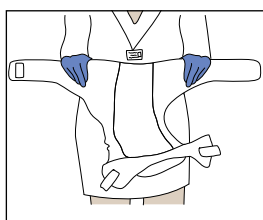


1 Fold bleen ud og fold den langs, så der skabes en skålform med bagsiden vendt udad. Berør ikke indersiden af bleen.

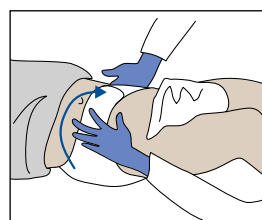


4 Fastgør bæltet rundt om hofterne ved hjælp af velcrobåndene.

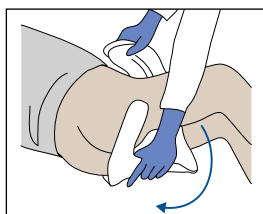


2 Læg brugeren på siden. Indfør bleen mellem benene med retning fra front mod bag. Brug vådindikatorens linjer til at tjekke om bleen er placeret midt på kroppen. Læg eventuelt et håndklæde mellem knæene for at lette processen.

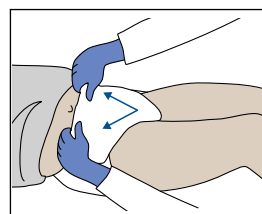

5 Fastgør bleens front til bæltet ved hjælp af kombitapen på begge sider.

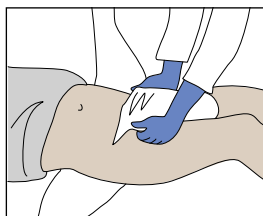

3 Læg brugeren på ryggen. Træk bleen op fortil.

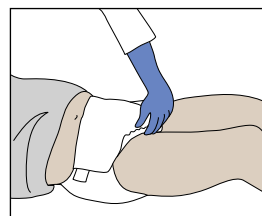

5 Sørg for, at kanterne sidder tæt ind mod lyskenområdet med bagsiden vendt udad og væk fra huden.



Kombitapen med klæb og velcro kan omplaceres flere gange. Sørg for, at bleen sidder tæt og behageligt. Hvis produktet ikke sidder tæt i lyskenområdet, fikseses bæltet længere oppe på hoften.



Påsætningsvideoer