

# Abri-San Abri-Man Special ABENA Nova San

Påsætningsvideoer




Stående  
Selvhjulpen

Åben ble - Todelt system




**1**  
Træk fikseringsbukserne op midt på benene. Fold bleen på langs for at skabe en skålform med bagsiden vendt udad. Rør ikke ved indersiden af bleen.

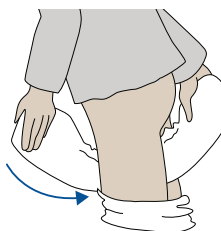

**2**  
Før bleen mellem benene forfra og bagud.



**3**  
Placer bleen tæt ind i lyskeområdet med bagsiden vendt væk fra huden. Brug vådindikatoren med graduerings-skala til at kontrollere, om produktet er påført nøjagtigt i midten.

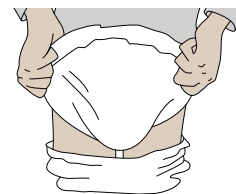

**4**  
Træk bagsiden af bleen vandret ud for at skabe en skålform mellem benene. Sørg for, at bleen sidder tæt omkring bagdelen og lysken. Fold kanterne ud.



**5**  
Træk forsiden af bleen vandret ud, og juster forsiden af fikseringsbukserne på plads.



**6**  
Juster fikseringsbukserne bagpå, og sørg for, at buksebenene er placeret på bleens kanter. Juster bleen og fikseringsbukserne.

**!** Abri-San produkter i størrelse 5-11 bør altid bruges sammen med specielle fikseringsbukser for at sikre en tætsiddende pasform og for at mindske risikoen for lækager. Se side 4-5.

**!** Vores filosofi: Så lille som muligt, så stor som nødvendigt.


# Abri-San Abri-Man Special ABENA Nova San

Påsætningsvideoer




Stående  
Med hjælp

Åben ble - Todelt system

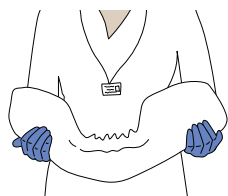

**1**  
Fold bleen på langs med bagsiden vendt udad for at skabe en skålform. Rør ikke ved indersiden af bleen.

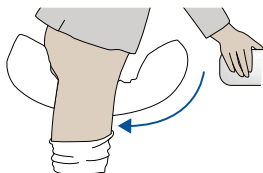


**2**  
Sørg for, at brugeren er ordentligt støttet, og før bleen forfra og bagud. Placer den øverste kant af bleen ved halebenet.




**3**  
Fold bagsiden af bleen vandret ud for at skabe en skålform mellem benene. Brug vådindikatoren med gradueringsskala til at kontrollere, om produktet er påført nøjagtigt i midten.



**4**  
Fold bleen vandret ud foran. Sørg for, at bleen sidder stramt og behageligt ved bagdelen og lysken.

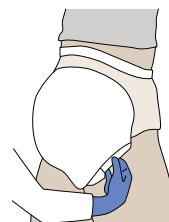

**5**  
Træk fikseringsbukserne op på plads. Hvis det er muligt, skal buksebenene placeres på bagsidens kanter på bleen.

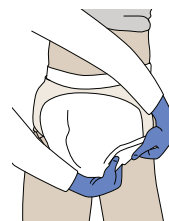

**6**  
Juster fikseringsbukserne foran, og sørg for, at bleens kanter følger lysken.

**!** Abri-San produkter i størrelse 5-11 bør altid bruges sammen med specielle fikseringsbukser for at sikre en tætsiddende pasform og for at mindske risikoen for lækager. Se side 4-5.

**!** Vores filosofi: Så lille som muligt, så stor som nødvendigt.


# Abri-San Abri-Man Special ABENA Nova San

Påsætningsvideoer




Liggende  
Med hjælp


Åben ble - Todelt system

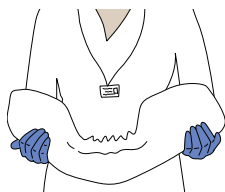


**1**  
Fold bleen på langs med bagsiden vendt udad for at skabe en skålform. Rør ikke ved inder-siden af bleen.

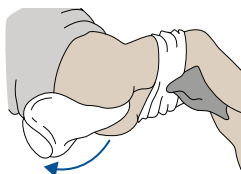


**2**  
Før den foldede ble forfra og bagud, og skab en skålform mellem benene. Læg eventuelt et håndklæde mellem knæene for at lette processen.

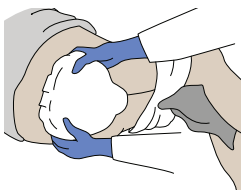


**3**  
Træk bagsiden af bleen vandret ud, og placer den øverste kant af bleen ved halebenet. Brug vådindikatoren med gradueringsskala til at kontrollere, om produktet er påført nøjagtigt i midten.

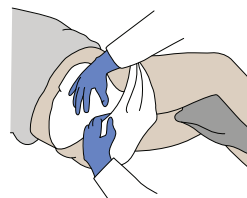

**4**  
Træk fikseringsbukserne op.

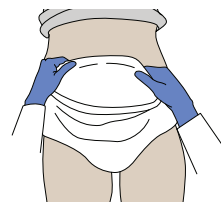

**5**  
Lad brugeren ligge på ryggen og fold bleen ud foran. Bleen skal skabe en skålform i lyskeområdet og sidde tæt til kroppen.

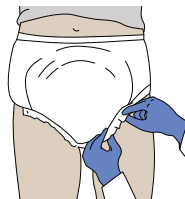

**6**  
Juster fikseringsbukserne foran. Hvis det er muligt, skal buksebenene placeres på bagsidens kanter på bleen.

**!** Abri-San produkter i størrelse 5-11 bør altid bruges sammen med specielle fikseringsbukser for at sikre en tætsiddende pasform og for at mindske risikoen for lækager. Se side 4-5.

**!** Vores filosofi: Så lille som muligt, så stor som nødvendigt.