

Abri-Form

ABENA Slip FLEXI FIT


ABENA Nova Form

Påsætningsvideoer




Stående
Selvhjulpen

Tapeble - Alt i ét produkt

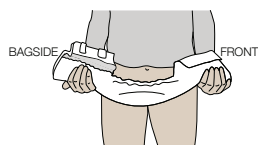


1 Fold bleen på langs med bagsiden vendt udad for at skabe en skålform. Rør ikke indersiden af bleen.

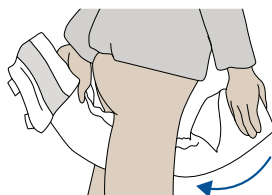

2 Før bleen forfra og bagud.




3 Træk den forreste del af bleen ud, så der opstår en skålform. Brug vådindikator med gradueringsskala til at kontrollere, om produktet er påført nøjagtigt i midten.

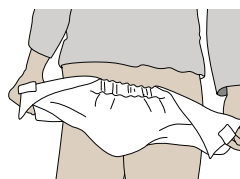

4 Træk bagsiden af bleen vandret ud. Sørg for, at den passer godt ind i lyskeområdet med bagsiden vendt udad.



5 Fastgør de nederste tapestykker på begge sider. Før tapen lidt opad for at forbedre pasformen omkring benene.

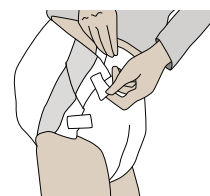

6 Fastgør de øverste tapestykker vinklet nedad over folden.



7 Sørg for, at kanterne af bleen passer godt ind i lyskeområdet, med bagsiden vendt væk fra huden.

! Kombi-tapestykkerne med klæb og velcro kan omplaceres flere gange.

Abri-Form

ABENA Slip FLEXI FIT


ABENA Nova Form

Påsætningsvideoer




Stående
Med hjælp


Tapeble - Alt i ét produkt

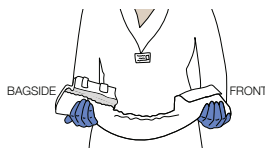

1
Fold bleen på langs med bagsiden vendt udad for at skabe en skålform. Rør ikke indersiden af bleen.

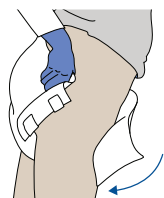


2
Før bleen mellem benene forfra og bagud. Placer den øverste bagkant af bleen ved halebenet.

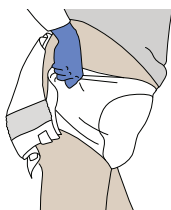

3
Træk den forreste del af bleen ud, så der opstår en skålform mellem benene. Brug vådindikatoren med gradueringsskala til at kontrollere, om produktet er påført nøjagtigt i midten.



4
Fastgør de nederste tapestykker på begge sider. Før tapen lidt opad for at forbedre pasformen omkring benene.

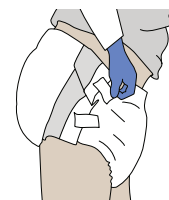

5
Fastgør de øverste tapestykker vinklet nedad over folden.



6
Sørg for, at kanterne af bleen passer godt ind i lyskeområdet, med bagsiden vendt væk fra huden.

! ABENA Slip FLEXI FIT-serien med fleksible sider giver en tætsiddende pasform, der understøtter alle kropstyper.

! Kombitapestykkerne med klæb og velcro kan omplaceres flere gange.

Abri-Form


ABENA Slip FLEXI FIT

ABENA Nova Form


Påsætningsvideoer




Liggende
Med hjælp
Tapeble - Alt i ét produkt

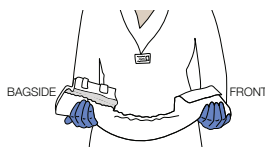


1
Fold bleen på langs med bagsiden vendt udad for at skabe en skålform. Rør ikke indersiden af bleen.

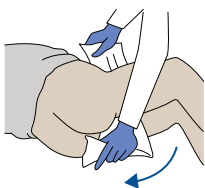

2
Placer brugeren på siden. Før den foldede ble forfra og bagud, og skab en skålform mellem benene. Læg eventuelt et håndklæde mellem knæene for at lette processen.

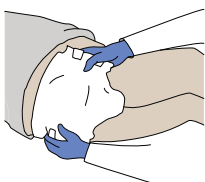

3
Fold den bagerste ende af bleen ud. Brug vådindikatoren med gradueringskala til at kontrollere, om produktet er påført nøjagtigt i midten.

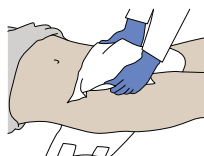


4
Placer brugeren på ryggen. Bred den forreste del af bleen ud, så der opstår en skålform mellem benene.



5
Fastgør det nederste tape på begge sider og før tapestykkerne lidt opad for at forbedre pasformen omkring benene.



6
Fastgør de øverste tapestykker vinklet nedad over folden.

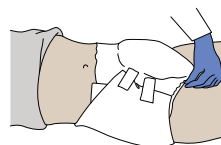

7
Sørg for, at kanterne af bleen passer godt ind i lyskeområdet, med bagsiden vendt væk fra huden.

! ABENA Slip FLEXI FIT-serien med fleksible sider giver en tætsiddende pasform, der understøtter alle kropstyper.

! Kombi-tapestykkerne med klæb og velcro kan omplaceres flere gange.