



Hvad kan man se og læse ud af det udfyldte kortlægnings-skema



Kortlægnings-skema



Klik eller scan koden
- og find vejledning i brug af
kortlægnings-skema

Navn: **Hans Hansen**

Hvilke bleer og evt. fikseringstrusser anvendes under kortlægningen:

Dag og aften anvendes: ABENA L1	Nat anvendes: ABENA L3	Fikseringstrusse, der evt. anvendes:
---	----------------------------------	--------------------------------------

1. dag Dato:	Ble tages af kl.	Antal felter der har skiftet farve	Vådt tøj eller sengetøj		Er der afføring i bleen		Hjælpes bruger på toilet		Vandladning / aff. i forbindelse med toiletbesøg		Hvilken ble lægges på	Initialer
			Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja U=urin / A=aff.	Nej		
	kl. 7:45	6 felter		x		x		x			ABENA Slip L1	xx
	kl. 11:50	3 felter	x			x		x			ABENA Slip L1	xx
	kl. 15:45	4 felter		x	x			x			ABENA Slip L1	xx
	kl. 20:00	6 felter		x	x			x			ABENA Slip L3	xx
	kl. 2:50	6 felter		x		x		x			ABENA Slip L3	xx
	kl. 4:45	3 felter		x		x		x			ABENA Slip L3	xx
	kl.	felter										

2. dag Dato:	Ble tages af kl.	Antal felter der har skiftet farve	Vådt tøj eller sengetøj		Er der afføring i bleen		Hjælpes bruger på toilet		Vandladning / aff. i forbindelse med toiletbesøg		Hvilken ble lægges på	Initialer
			Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja U+A	Nej		
	kl. 8:00	6 felter	x			x		x			ABENA Slip L1	xx
	kl. 13:15	3 felter		x		x		x		x	ABENA Slip L1	xx
	kl. 17:45	3 felter		x	x			x			ABENA Slip L1	xx
	kl. 19:45	2 felter		x	x			x			ABENA Slip L3	xx
	kl. 1:05	5 felter		x	x			x			ABENA Slip L3	xx
	kl. 2:45	4 felter		x		x		x			ABENA Slip L3	xx
	kl.	felter										

3. dag Dato:	Ble tages af kl.	Antal felter der har skiftet farve	Vådt tøj eller sengetøj		Er der afføring i bleen		Hjælpes bruger på toilet		Vandladning / aff. i forbindelse med toiletbesøg		Hvilken ble lægges på	Initialer
			Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja U=urin / A=aff.	Nej		
	kl. 7:35	5 felter	x			x		x			ABENA Slip L1	xx
	kl. 12:45	5 felter		x	x			x			ABENA Slip L1	xx
	kl. 15:45	6 felter		x		x		x			ABENA Slip L1	xx
	kl. 19:15	3 felter		x		x		x		U	ABENA Slip L3	xx
	kl. 00:30	6 felter		x		x		x			ABENA Slip L3	xx
	kl.	felter										
	kl.	felter										

VEND

- 1** Hvor ofte og hvornår skiftes bleen?
- Er det passende?
- 2** Hvor udnyttet er bleen?
- Er det optimalt?
- 3** Er der lækager?
- Hvilken løsning kan der evt. være på det?
- 4** Er der afføring i bleen eller i forbindelse med toiletbesøg?
- Noget der bør ændres?
- 5** Hvor ofte hjælpes borgeren på toilet?
- Er det passende?

Tag altid stilling til en eventuel ændring i valg af produkt ud fra borgerens helhedssituation.

